

cartinamic



Para una segura regeneración del cartílago

DESCRIPCIÓN

CartiNamic es un kit para reparación de lesiones focales de cartílago que consta de una membrana biodegradable acelularizada de colágeno I / III y Elastina estructurada en bicapa, indicada para cubrir defectos de cartílago, y un instrumento de precisión para la preparación de la lesión mediante estimulación mínimamente invasiva de la médula ósea subcondral, según la técnica publicada NAMIC. Behrens et al. 2015 The Knee.

Indicación:

Lesiones focales de cartílago grado III/IV en rodilla, tobillo, cadera, hombro, codo o muñeca


Imagen de producto:



Nano FX



Cartimaix

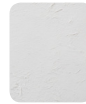

CAR2530


Plantilla medición




Aluminium Template




INSTRUCCIONES DE USO

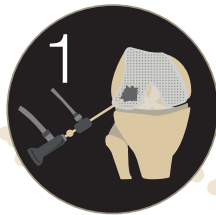


. Localización

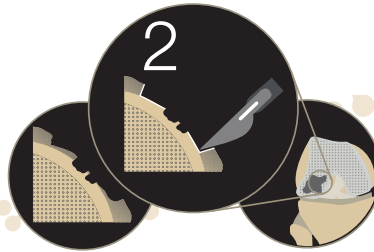

. Debridar tejido dañado y dejar paredes verticales

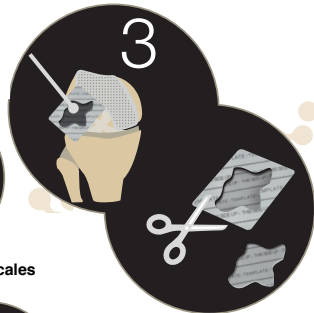

. Calcar la lesión

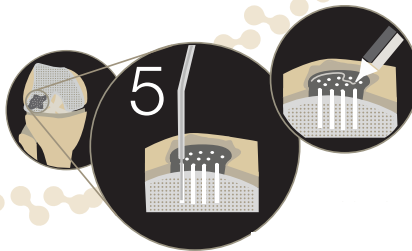

. Nanofractura (perforaciones 1mmx9mm)



. Sellado de la matriz mediante fibrina

. Opción por artroscopia utilizando trefinas de mosaicoplastia como guía. *Piontek et al. KSSTA 201*

Behrens et al. The Knee 2015

Eldracher et al. AJSM 2014

Chen et al. JOR 2011



FABRICANTES

Membrana Cartimaix: Matricel GmbH, Kaiserstrasse 100, D-52134 Herzogenrath, Germany

Instrumento Nano FX: Artrosurface Inc. 28 forge parkway, franklin, MA 02038

