



CERAMENT® G




Número de artículo
5 ml A0535-02
10 ml A0535-01

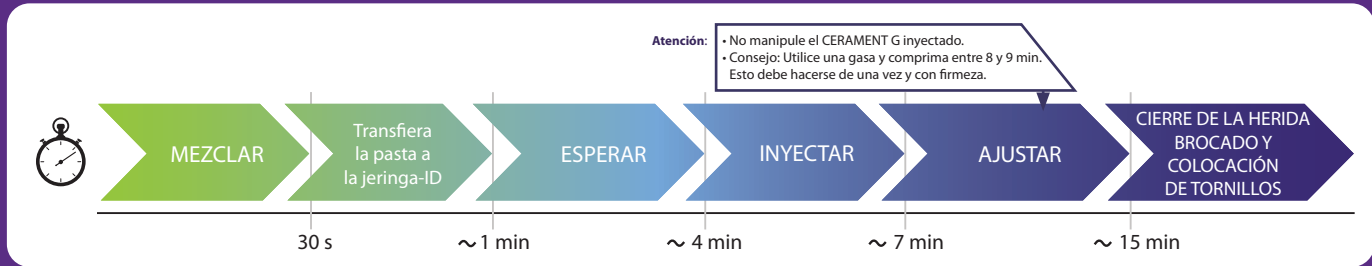


- 1**
- Quite la tapa del líquido de mezcla.
 - Mantenga el vial estable.
 - Empuje una de las agujas a través de la membrana del vial.

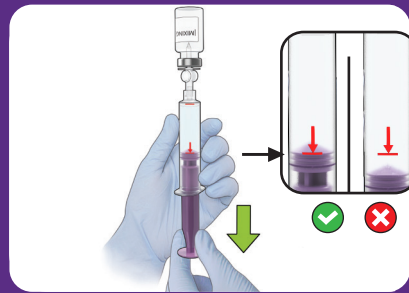


- 2**
- Acople la jeringa púrpura a la aguja.
 - Extraiga la solución salina solo hasta la marca roja de la jeringa; quedará solución salina en el vial de vidrio.
 - Desconecte la jeringa llena de solución salina de la aguja.

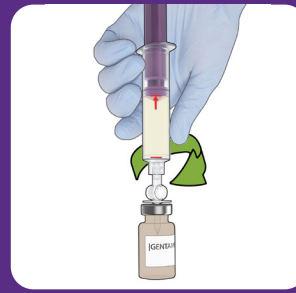


- 3**
- Empuje la segunda aguja a través de la membrana del vial de gentamicina.
 - Acople la jeringa llena de solución salina a la aguja.

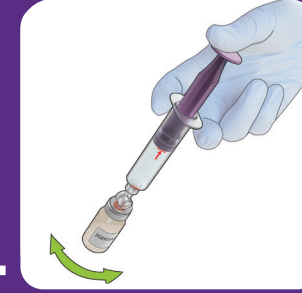


- 4**
- Transfiera todo el líquido al vial de gentamicina.
 - Disuelva todo el polvo de gentamicina.

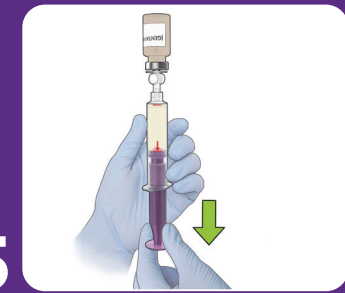


- 5**
- Vuelva a introducir toda la solución de gentamicina en la jeringa. Esto puede requerir retirar ligeramente la aguja.

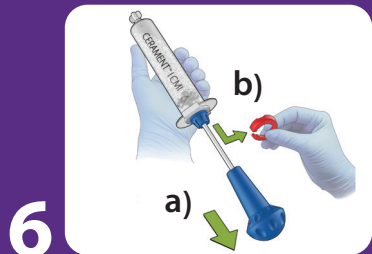


- 6**
- Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

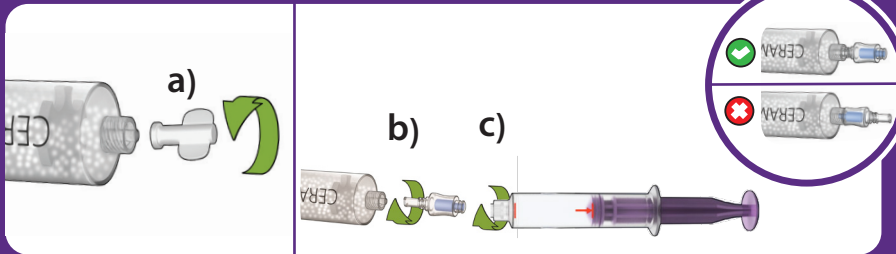


- 7**
- b) Conecte la válvula con el extremo de la jeringa llena de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.
 - c) Conecte la jeringa con solución de gentamicina al extremo azul de la válvula, presione y gire en el sentido de las agujas del reloj.

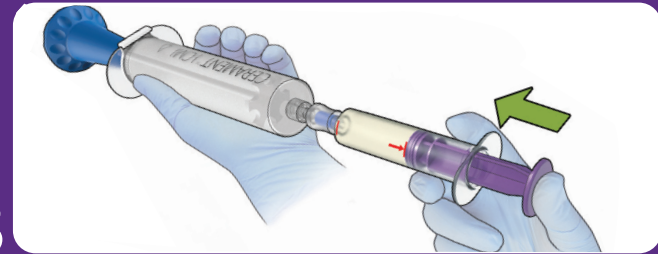


- 8**
- Inyecte toda la solución de gentamicina en la jeringa con polvo.
 - Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
 - Desconecte la jeringa de la válvula.

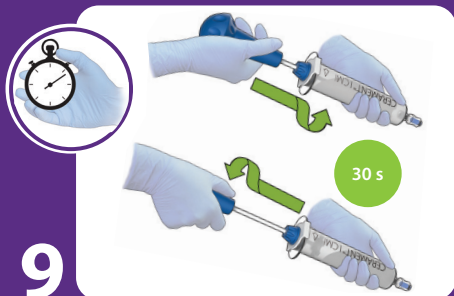


- 9**
- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
 - Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
 - Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

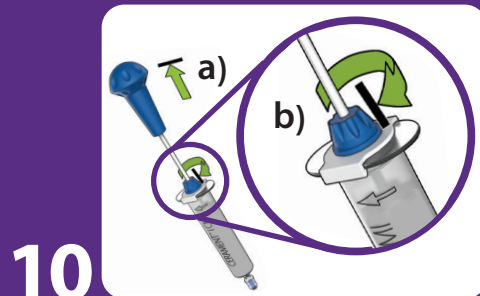

- 10**
- a) Retire completamente el mango azul.
 - b) Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

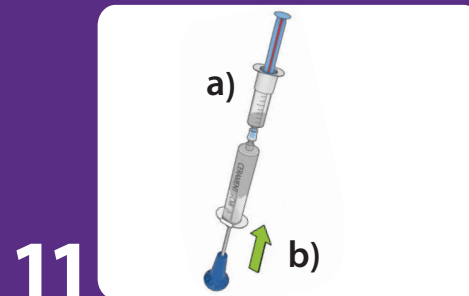

- 11**
- a) Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
 - b) Transfiera inmediatamente la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

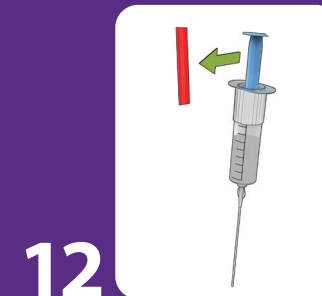

- 12**
- Quite el tapón rojo y la pasta ya está lista para usar.

RECURSOS ADICIONALES:
Consulte aquí nuestro vídeo sobre mezclas:



BONESUPPORT™

bonesupport.com
PR 01353-01 es EU ROW 04-2023