

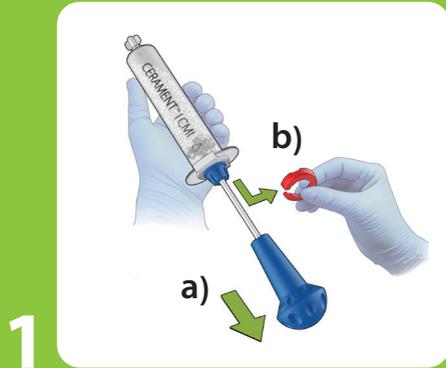


CERAMENT® BONE VOID FILLER

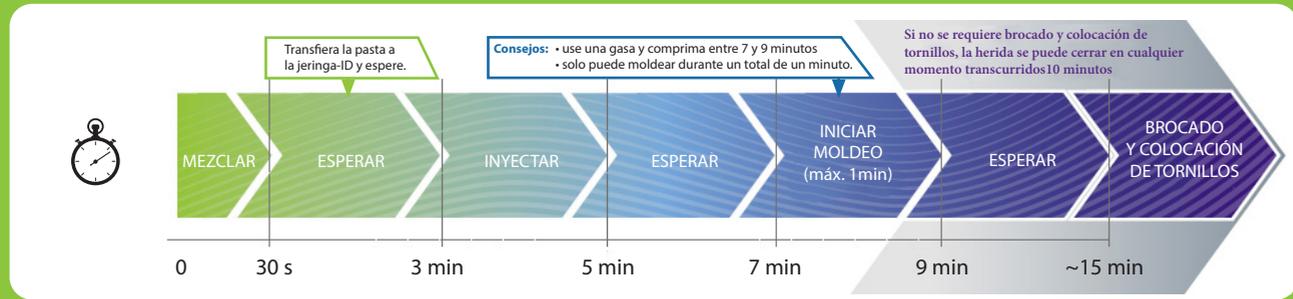


1

- Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

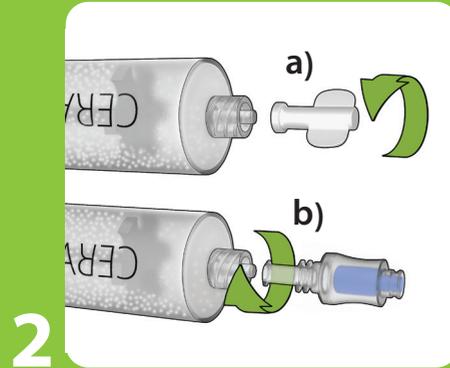

2

- Retire el tapón.
- Conecte la válvula con el extremo de la jeringa llena de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.

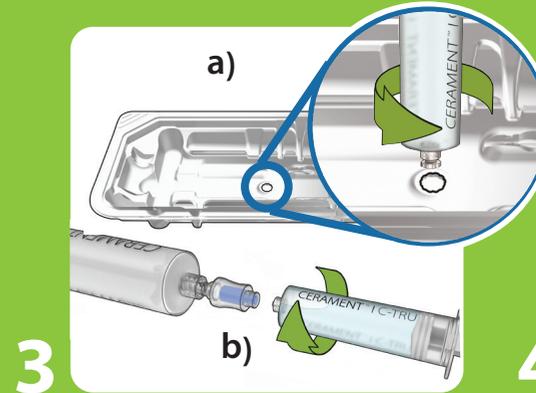


3

- Retire el tapón de la jeringa llena de líquido con la herramienta incrustada en el fondo de la bandeja del blíster, empuje y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Conecte la jeringa llena de líquido a la válvula azul girándola en el sentido de las agujas del reloj.




4

- Inyecte todo el líquido en la jeringa con el polvo.
- Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
- Desconecte la jeringa de la válvula.

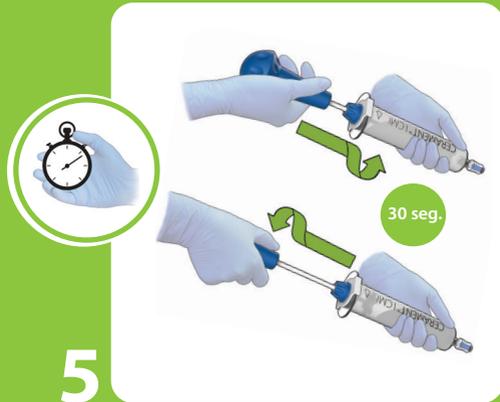


5

- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
- Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
- Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

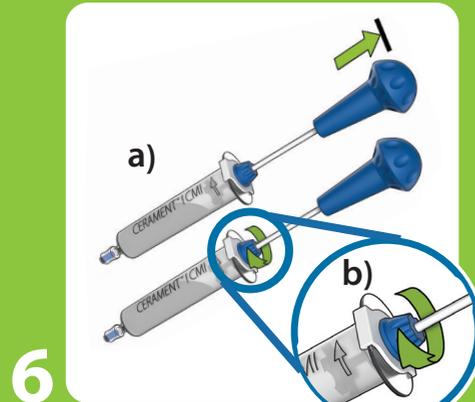


6

- Retire completamente el mango azul.
- Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

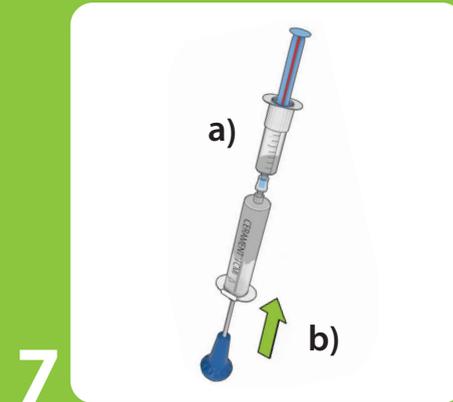

7

- Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
- Transfiera la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

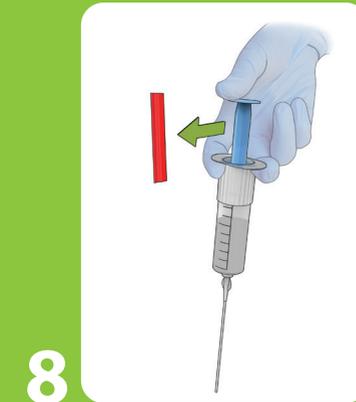

8

- No retire el tapón rojo hasta que esté listo para inyectar.

RECURSOS ADICIONALES:
Consulte aquí nuestro video sobre mezclas:



BONESUPPORT™
bonesupport.com

PR 01313-01 es EU ROW 02-2023