

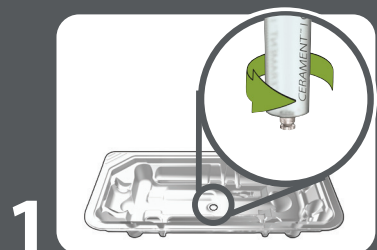


# CERAMENT® V

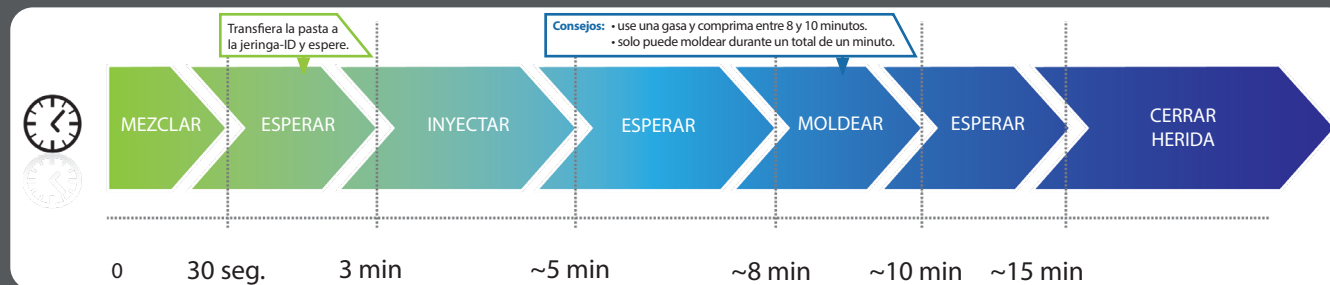


1

- Retire el tapón de la jeringa llena de líquido con la herramienta incrustada en el fondo de la bandeja del blister, empuje y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

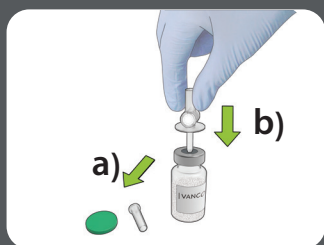


2

- Empuje la aguja a través del vial de vancomicina.

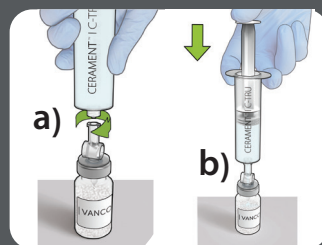


3

- Acople la jeringa a la aguja.
- Inyecte toda la solución en el vial.

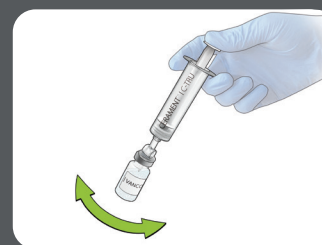


4

- Agite suavemente para disolver el polvo de vancomicina.

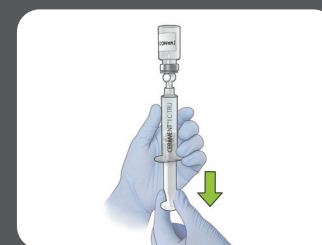


5

- Vuelva a introducir toda la solución de vancomicina en la jeringa. Para ello, puede ser necesario retirar ligeramente el pasador.

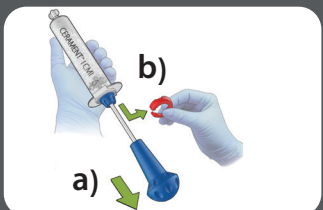


6

- Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

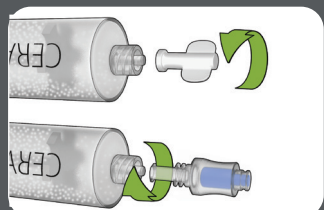

7

- Conecte la válvula con el extremo del dispositivo de mezcla lleno de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.

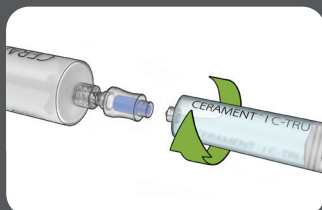


8

- Conecte la jeringa con solución de vancomicina al extremo azul de la válvula, presione y gire en el sentido de las agujas del reloj.




9

- Inyecte toda la solución de vancomicina en la jeringa con polvo.
- Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
- Desconecte la jeringa de la válvula.

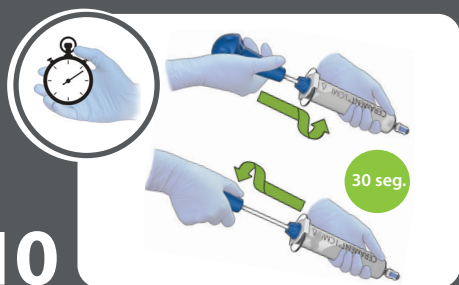


10

- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
- Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
- Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

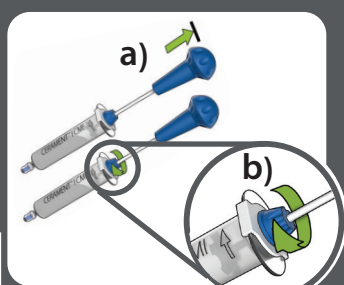


11

- Retire completamente el mango azul.
- Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

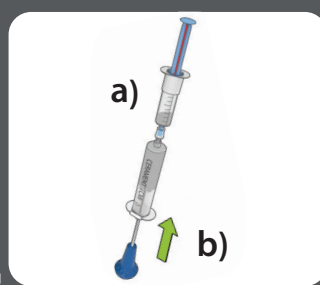

12

- Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
- Transfiera la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

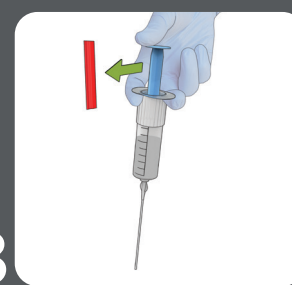

13

- No retire el tapón rojo hasta que esté listo para inyectar.

RECURSOS ADICIONALES:  
Consulte aquí nuestro vídeo sobre mezclas:



**BONESUPPORT™**  
bonesupport.com

PR 01315-01 es EU ROW 02-2023